

Masque barrière textile à usage non sanitaire – CATEGORIE 1

Fiche technique et recommandations



Ce design est recommandé par l'AFNOR et l'ANSM (Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé)

COMPOSITION ET DESCRIPTION PRODUIT :

- 2 toiles 100% coton de 115g/m² ou 52% polyester/48% coton de 115 g/m² (selon stock disponible)
- 1 couche de molleton 100% coton de 200g/m² disposée entre les 2 toiles
- Application d'un bord 100% coton tout autour, servant également de nouettes
- Coloris : **Blanc, couleur, imprimé ou tissé teint** en fonction des toiles en stock disponibles

RECOMMANDATIONS DE LAVAGE :

- Lavage en machine avec un produit lessiviel adapté au tissu dont le cycle comprendra au minimum un plateau de 30 minutes à 60°C.
- Séchage en machine modéré (retrait de 5 à 10% au premier séchage)
- Ne pas surcharger les machines afin d'éviter que les masques ne s'abiment
- Utiliser des filets de lavage (ou taie d'oreiller) afin d'éviter que les masques ne s'emmêlent entre eux
- Repassage à une température de 120/130°C



RECOMMANDATIONS D'UTILISATION :

- Avant toute première utilisation du masque : laver le masque à 60°C, puis le sécher en machine.
- Manipulation des masques :
 - o Avant de mettre le masque, se laver les mains à l'eau et au savon (ou solution hydroalcoolique)
 - o Appliquer le masque de façon à recouvrir le nez et la bouche et veillez à l'ajuster au mieux sur votre visage (voir photos ci-dessus).
 - o Eviter de toucher ou déplacer le masque lorsqu'on le porte
 - o Le temps de port est limité à 4 heures environ. Remplacer le masque lorsqu'il s'humidifie.
 - o Laver le masque à 60°C après chaque usage, puis le sécher avant toute réutilisation.

MASQUE EVALUE PAR LA DIRECTION GENERALE DES ARMEES :

- Masque réservé à des usages non sanitaires de catégorie 1 selon la note d'information du 29 mars 2020.
- Matériau dont les performances ont été mesurées par les laboratoires de DGA Maîtrise NRBC, 5 rue Lavoisier, 91710 Vert-le-Petit (RP/20-1925/DGA MNRBC/2000305/NP Version 2).
- Efficacité de filtration des particules de 3 µm > 90 %
- Perméabilité à l'air pour une dépression de 100 Pa > 96 L.m-2.s-18
- Design établi et testé sur porteur pendant 4 heures par le Groupe VDS

INFORMATIONS IMPORTANTES :

- Ce masque de protection textile est un **masque barrière individuel à usage des professionnels en contact avec le public, lavable et réutilisable.**
- **Ce type de masque ne remplace en aucun cas les précautions édictées par le Ministère de la Santé :** se laver les mains régulièrement, éternuer dans son coude, se tenir à une distance d'un mètre, utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter, saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades, etc.
- **Ce type de masque ne saurait dispenser des règles de confinement.**